


# フェミクッションによる治療と予防

## 骨盤臓器脱の症状

骨盤臓器脱（性器脱）は、膣内における膀胱・子宮・直腸の下垂、または膣外への膀胱・尿道・子宮・小腸・直腸の脱出という女性特有の病気です。

出てきた臓器により、膀胱瘤・尿道瘤・子宮脱・小腸瘤・直腸瘤と呼ばれています。

この病気は、骨盤内の臓器を支えている骨盤底筋というハンモック状の筋肉群の緩み、子宮を支えている靭帯の劣化によるものと言われています。この緩み、劣化の原因は、出産・加齢・更年期・便秘・肥満・喫煙・子宮摘出などと言われています。

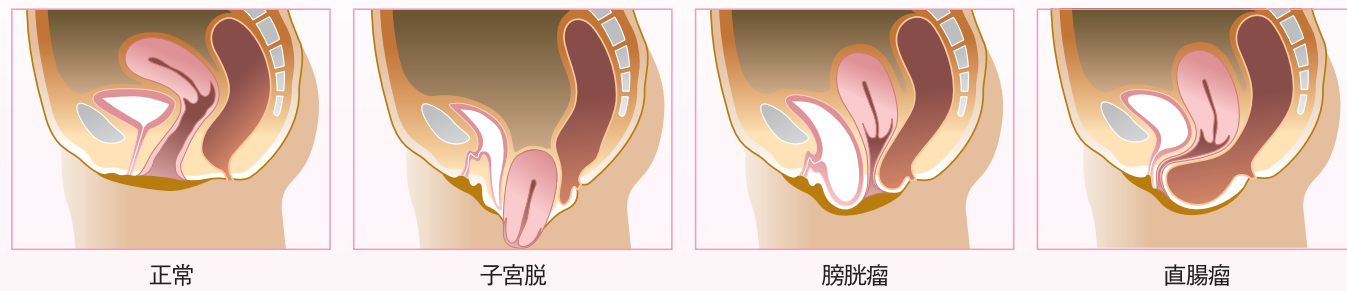

## 骨盤臓器脱による日常生活への影響


骨盤臓器脱になり、臓器が体外へ脱出すると、脱出した膣の表面が乾燥し、下着や皮膚と擦れて痛みを生じ、歩行困難になるなど日常生活の妨げとなります。また病気の進行過程において尿失禁・便失禁・排尿困難・排便困難になることがあります。

## 骨盤臓器脱の新しい治療用具として開発されたフェミクッション

骨盤臓器脱による症状を緩和するために、女性の感性でフェミクッションは開発されました。この製品をご使用いただくことにより、現在この病気でお困りの皆様に快適で清潔な日常生活を送っていただけるものと思います。

## フェミクッションの特徴と効果

フェミクッションは、骨盤臓器脱用に独自に開発されたクッション・ホルダー・サポーターの3つの構成部品からできております。まず、クッションにより、骨盤臓器脱で下垂した臓器を優しく受け止め、ホルダーに差し込むことによりクッションの位置ずれを防止します。更にサポーターによりクッションとホルダーをしっかり固定することにより、どんな動作にも柔軟に対応することができ、生活の様々なシーンを快適にお過ごしいただけます。ホルダーは少量の尿とおりものを吸収する素材を使用しているため、外出の時も安心です。またフェミクッションは、患者さん自身で必要に応じて手軽に装着でき、周囲の人に知られる心配もありません。ご使用中も、患者さん自身で状況を確認でき、破損等の有無の点検をすることにより安全にご使用いただけます。

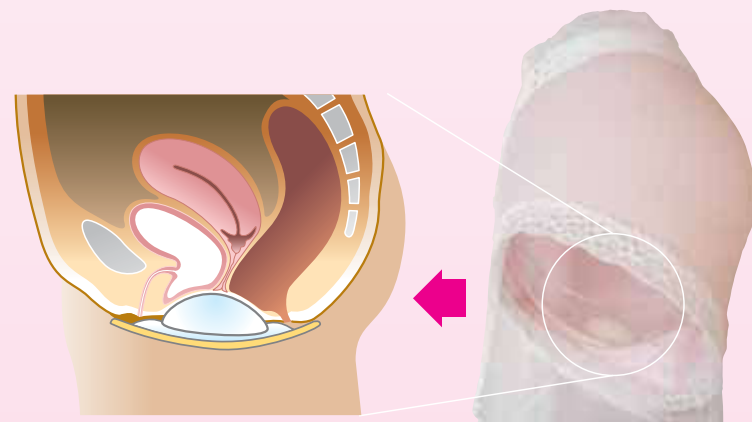

クッション・ホルダー・サポーターの装着イメージ  
（※実際の症例とは異なる場合がございます。）

\*\*\*\*\* フェミクッションはこのような方にお薦めです \*\*\*\*\*

- 日常生活に支障を感じている方（歩行困難、階段を上るのが辛い、荷物を持つのが辛い、家事が辛いなど）
- リングペッサリーの合わない方（痛い、外れてしまう、性行為に難がある）
- 手術待ちの方 ● 持病で手術が受けられない方 ● これから妊娠、出産を望む方

\*\*\*\*\*

## \*\*\*\*\* フェミクッションご使用のメリット \*\*\*\*\*

- ＊ ご使用方法がとても簡単です。
- ＊ 衣服の上からも目立ちません。
- ＊ ご使用に際し痛みを伴うことはありません。
- ＊ お手入れが簡単で清潔にご使用頂けます。
- ＊ 下着感覚でご使用頂けます。
- ＊ 性行為の妨げになりません。

## フェミクッション・スターターキット

初めてフェミクッションをお使いになる方には、最初にフェミクッション・スターターキットをご利用いただけます。

### パッケージの内容

- クッション S・M・L （数量についてはお申し込み用紙をご参照ください）
- ホルダー S・M/L
- サポーター S・M・L・LL・3L・4L のいずれか1枚
- 洗浄栓 1個

スターターキットをお選びになる際は、先ずご自身の下着のサイズを参考にサポーターのサイズをお選びください。

※クッションとホルダーのサイズについては、ご自身で症状に合わせてご利用いただけるようになっております。現在の症状においてご使用にならないサイズのクッションとホルダーは、お手元に保管していただき、症状に変化が感じられたときご利用いただくことができます。



日本製

医療機器類別/脱疾治療用器具、一般医療機器/クラス1、一般的名称/脱疾治療用ストラップ、品目番号/13B2X1009600001

## 構成品について

### ●クッション

表面はシリコーンゴム100%を使用しております。内部にはクッション材が入っているため、振動を吸収し、臓器を優しく受け止めます。サイズはS・M・L計3サイズ

### ●ホルダー

クッションをしっかりと定位置で固定します。クッションの前後のずれや膣内への進入を防ぐことができ、クッションを安全にご使用いただけます。表面層・吸収層・防水層・固定するための層の4層からなり、少量の尿やおりものを吸収します。汚れのつど洗濯することができるので衛生的です。

### ●サポーター

ホルダーで固定したクッションを定位置で保持する機能が付いた専用下着です。普段お使いの下着と同じようにご使用いただけます。サイズはS・M・L・LL・3L・4Lの計6サイズをご用意しております。右の表を参考にご自身に合ったサイズをお選びください。

サイズ	ウエスト※	ヒップ
S	60～70 cm	82～ 90 cm
M	65～75 cm	87～ 95 cm
L	69～79 cm	92～100 cm
LL	73～83 cm	97～105 cm
3L	80～88 cm	102～110 cm
4L	85～93 cm	107～115 cm

※ヒップ部分は伸縮性がありますが、一部伸縮しない素材のため、ご注文の際はウエストサイズをよくご確認ください。  
※別途特注サイズもございますので、ご注文の際はお問い合わせ下さい。

